


Procedimiento para el uso del kit de bolsa de drenaje ASEPT® Una guía paso a paso


El Kit de bolsa de drenaje ASEPT® solo se debe utilizar para el drenaje peritoneal junto con el catéter para drenaje peritoneal ASEPT®, que está incluido en el Sistema de drenaje peritoneal ASEPT®. Este cartel solo se debe utilizar como guía. Lea y consulte las instrucciones de uso para obtener explicaciones detalladas, advertencias y precauciones, así como otra información importante relacionada con el producto y los procedimientos.




Lávese las manos con agua y jabón durante al menos un minuto. Retire el apósito del catéter. Si hay señales de infección, no continúe. Comuníquese con su médico o enfermera.

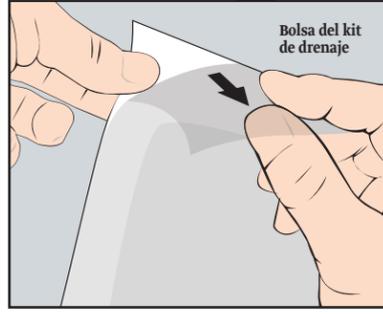


Comenzando desde la parte superior, abra completamente la bolsa del kit de drenaje y retire el paquete de procedimiento.

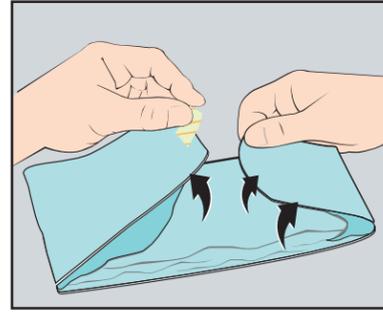


Abra el paquete de procedimiento. Retire la cinta y despliegue el envoltorio azul. Deje los elementos incluidos sobre el envoltorio.

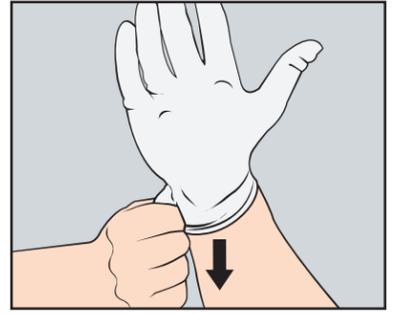


Tome uno de los guantes por la muñeca y colóqueselo. Tome el otro guante por la muñeca y colóqueselo en la otra mano. Los guantes se pueden colocar indistintamente en cualquier mano.

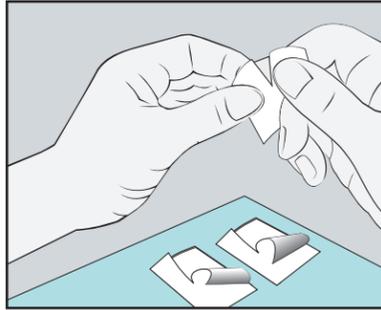


Abra los tres paños con alcohol, pero no los retire de las bolsas. Coloque los paños sobre el envoltorio azul.

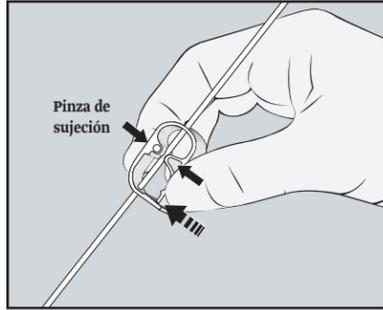


Levante la bolsa de drenaje y presione la pinza de sujeción sobre la vía de drenaje hasta cerrarla completamente.

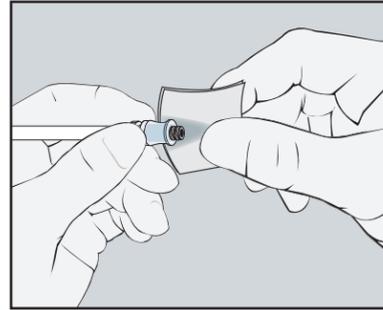


Sostenga el extremo de la válvula del catéter con una mano y limpie vigorosamente la superficie de la válvula y alrededor de esta con uno de los paños con alcohol.

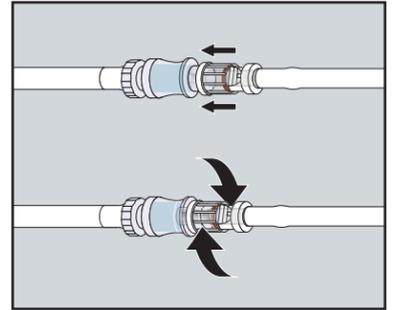


Retire la tapa protectora del Conector ASEPT® en la vía de drenaje y colóquelo alineado al centro de la válvula del catéter. Presiónelo hacia adentro, gírelo en sentido horario y conéctelo con firmeza.

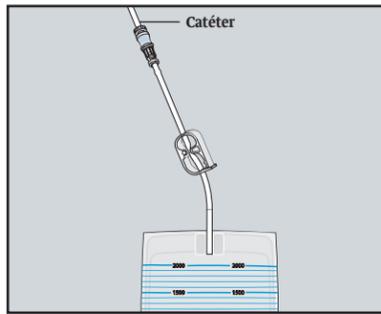


Coloque la bolsa de drenaje con los tubos por debajo del catéter. La bolsa requiere de la gravedad para recolectar líquidos.

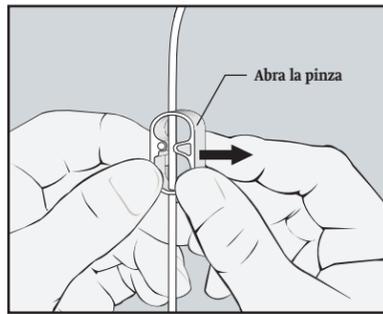


Suelte la pinza de sujeción de la vía de drenaje para que el líquido comience a drenar. La pinza de sujeción puede utilizarse para ajustar el flujo de líquido.

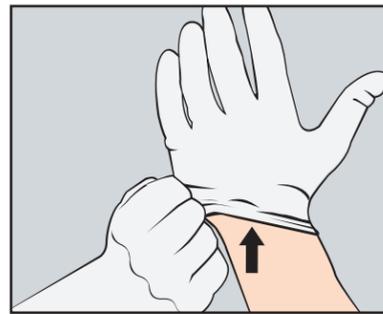


Quítese los guantes y deséchelos.

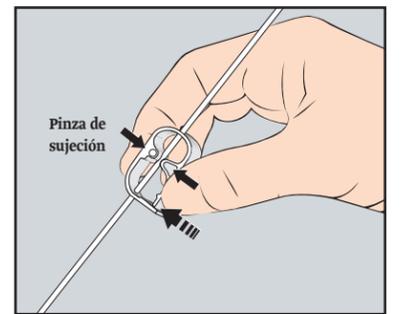

La recolección de líquidos puede hacerse más lenta cuando se haya drenado casi completamente y cuando la bolsa parezca estar llena. Presione la pinza de sujeción para cerrar la vía de drenaje completamente.

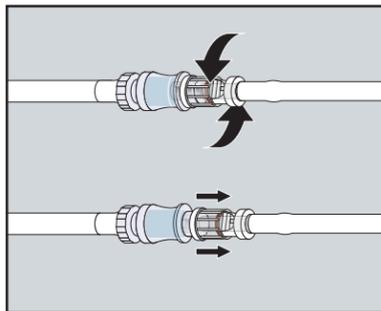


Desconecte el conector de la vía de drenaje de la válvula del catéter girándolo en sentido antihorario.

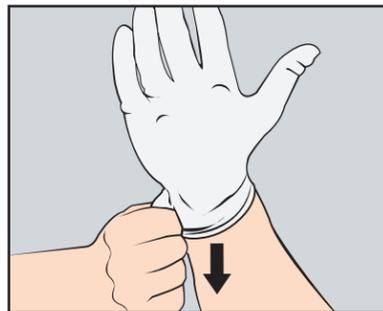


Colóquese el segundo par de guantes. Tome uno de los guantes por la muñeca y colóqueselo. Tome el otro guante por la muñeca y colóqueselo en la otra mano.




Desinfecte el área alrededor del lugar de salida del catéter con los dos paños con alcohol restantes.

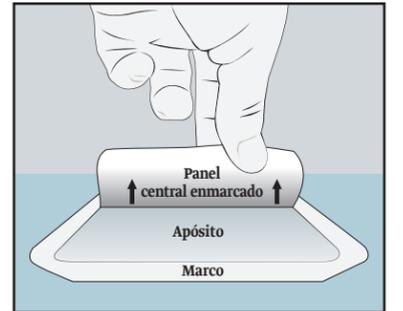


Retire el panel central enmarcado del apósito autoadhesivo. Coloque la parte trasera del apósito sobre el envoltorio azul.

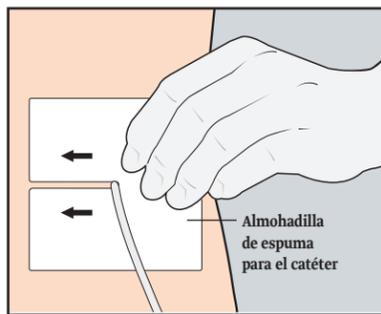


Coloque la almohadilla de espuma alrededor del catéter.

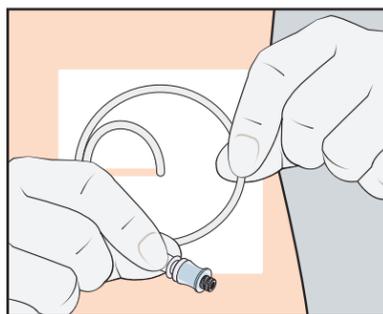


Gire el catéter alrededor en un círculo y colóquelo por encima de la almohadilla de espuma. Tenga la precaución de no pinzar el catéter.

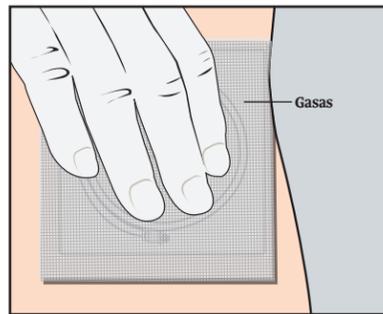


Coloque las gasas por encima del catéter y sosténgalas.

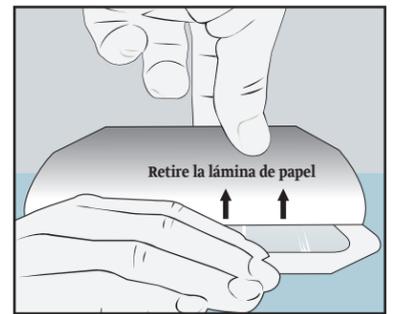


Retire la lámina de papel del apósito para exponer la superficie autoadhesiva.

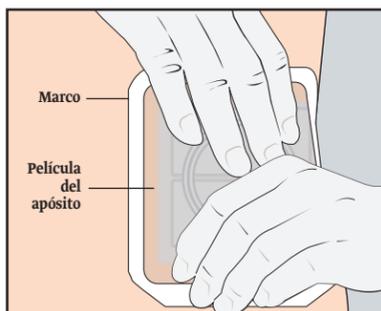


Revise el área donde se aplicará el apósito a través de la película y centre el apósito por encima de la herida. Presiónelo.

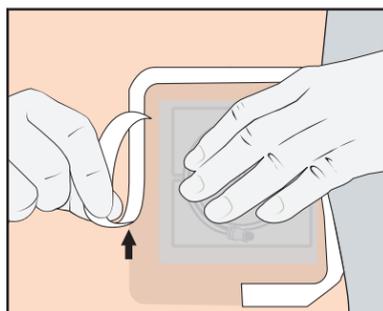

Retire lentamente el marco de papel restante despegándolo de la sección dividida mientras alisa los bordes del apósito. Presione con firmeza el apósito desde el centro hacia los bordes.

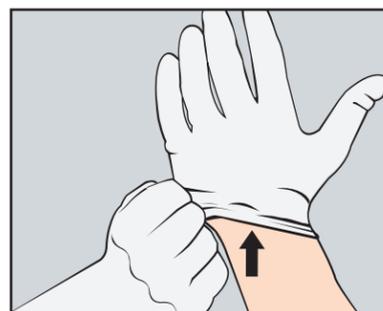

Quítese los guantes y deséchelos.

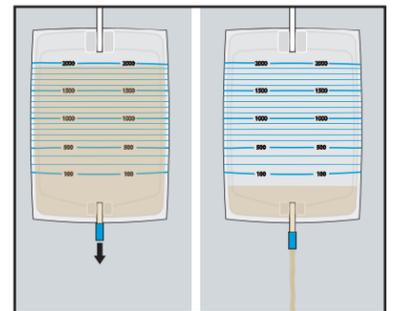

Vacío la bolsa en el inodoro o en el lavabo; para hacerlo, tire hacia arriba la válvula de liberación de color azul que se encuentra en la parte inferior de la bolsa. Deseche la bolsa vacía.

Antes de utilizar este producto, asegúrese de haber recibido capacitación por parte de un médico o una enfermera para utilizar de forma correcta los elementos de este kit. Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento de drenaje, comuníquese con su médico o enfermera.

Solo por prescripción médica
ASEPT® es una marca comercial registrada de pfm medical, inc.
©2016 B. Braun Interventional Systems Inc.
CV2050 10/16

Distribuido por:

B. Braun Interventional Systems Inc.

824 Twelfth Avenue | Bethlehem, PA 18018 Estados Unidos

Tel. 877 836 2228 | Fax 610 849 1334 | www.bisusa.org