


# Kit de drenaje ASEPT® de 600ml o 1,000ml

## Guía paso a paso


El Kit de Drenaje ASEPT® de 600ml o 1,000ml es para ser usado sólo para drenaje pleural o peritoneal con el Catéter de Drenaje ASEPT®, que está incluido en el Sistema de Drenaje ASEPT®. Este cartel debe usarse sólo como una guía. Lea y consulte las instrucciones de Uso para obtener instrucciones detalladas, advertencias, precauciones y otra información importante relacionada con el procedimiento.




Lávese sus manos con agua y jabón por al menos un minuto. Retire el empaque del catéter. Si se presentan signos de infección, no continúe. Comuníquese con su médico o enfermera.

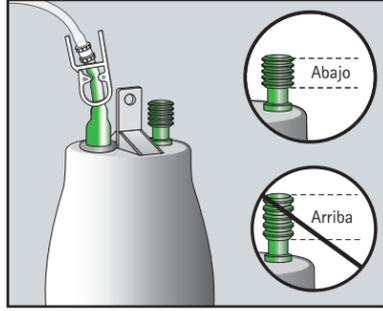


Tome la bolsa que contiene el kit de drenaje ASEPT®. Mire el indicador de vacío verde. Debe estar hacia abajo, no hacia arriba. Si está hacia arriba, abra un nuevo kit de drenaje y vuelva a empezar.

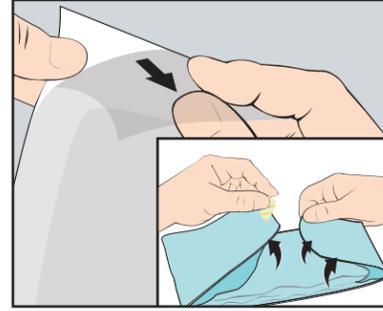


Abra la bolsa de kit de drenaje hasta el final y retire el paquete de procedimiento. Abra el paquete de procedimiento. Retire la cinta y despliegue el envoltorio azul.

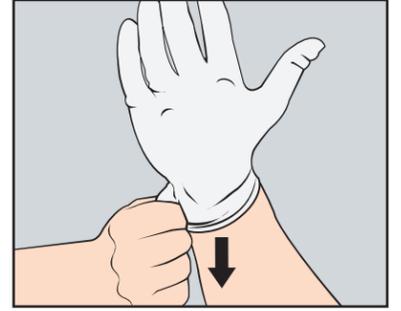


Tome un guante por la muñeca y póngaselo. Tome el otro guante por la muñeca y póngaselo en la otra mano. Ambos guantes sirven en cualquier mano.

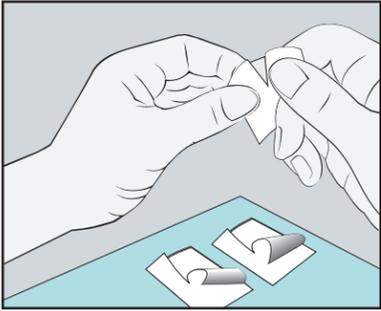


Abra las tres almohadillas con alcohol, pero no retire las almohadillas de las bolsas. Coloque las almohadillas en el envoltorio azul.

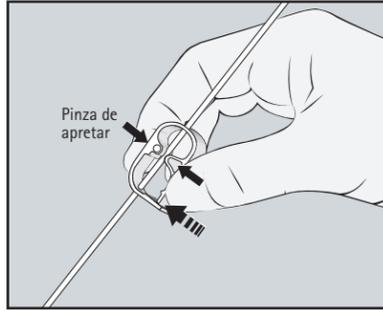


Tome la botella de vacío y retire la tira de alambre en la línea de drenaje. Apriete la pinza de apretar para que la línea de drenaje esté completamente cerrada.

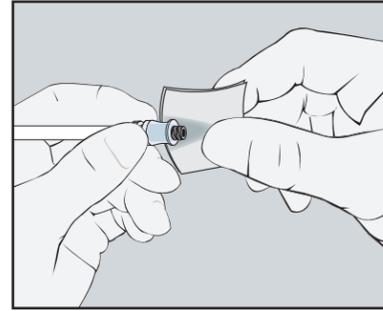


Sostenga el extremo de la válvula del catéter en una mano y vigorosamente limpie la superficie de la válvula y alrededor de la válvula con una de las almohadillas de alcohol.

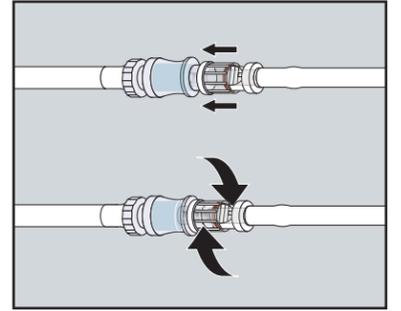


Retire la tapa protectora del Conector ASEPT® en la línea de drenaje y alinee en el centro de la válvula de catéter. Presione gire en el sentido de las manecillas del reloj y conecte con firmeza.

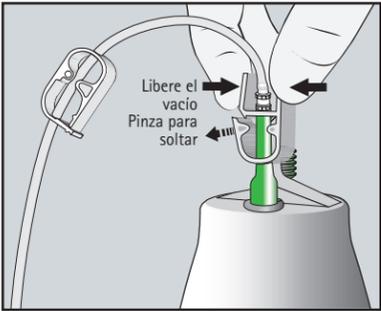


Suelte la pinza blanca de liberación de vacío y apriete hasta que deje de pellizcar el tubo verde cerrado.

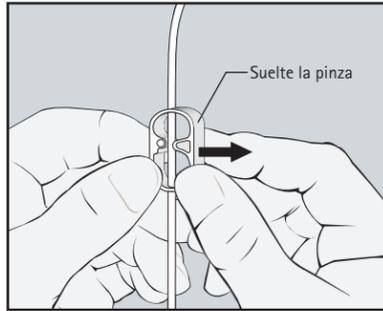


Suelte la pinza en la línea de drenaje para comenzar el drenaje de fluido. Si siente dolor o malestar, ajuste la abrazadera de la línea de drenaje para disminuir o detener el flujo del fluido.

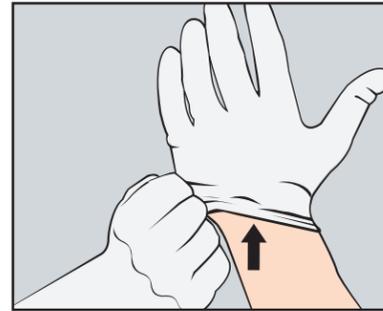


Quítese los guantes y deséchelos.

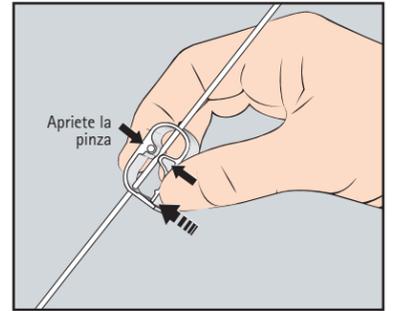

Quando el flujo se detiene o la botella está cargada con alrededor de dos tercios de fluido o más, cierre la línea de drenaje apretando la pinza hasta cerrar completamente.

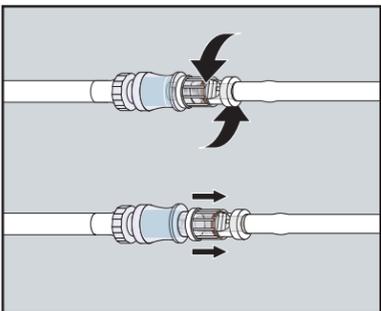


Desconecte el conector de la línea de drenaje de la válvula de catéter girando el conector en sentido opuesto a las manecillas del reloj.

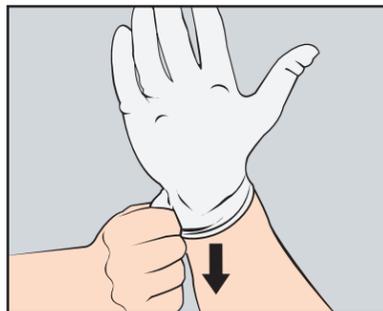


Póngase el segundo par de guantes. Tome un guante por la muñeca y póngaselo. Tome el segundo por la muñeca y póngaselo en la otra mano.




Desinfectar el área alrededor del sitio de salida del catéter con las dos almohadillas con alcohol restantes.

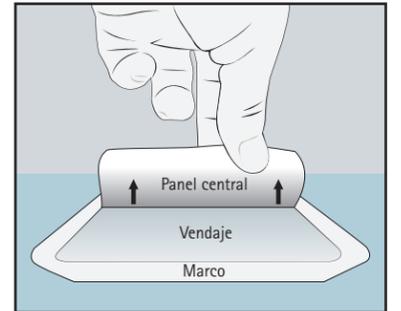


Retire el panel central del vendaje autoadhesivo. Vuelva a colocar el vendaje en la envoltura azul.

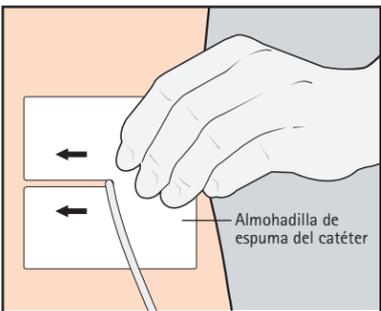


Coloque la almohadilla de espuma del catéter alrededor del catéter.

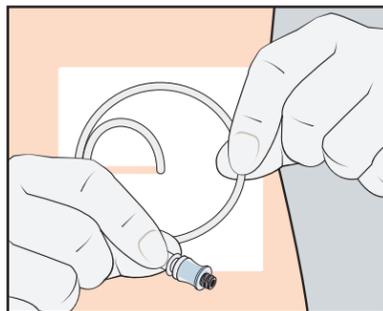


Enrolle el catéter en un círculo y colóquelo en la parte superior de la almohadilla de espuma. Tenga cuidado con no retorcer el catéter.

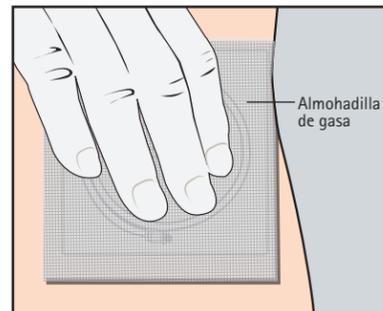


Coloque las almohadillas de gasa en la parte superior del catéter y manténgalas presionadas hacia abajo.

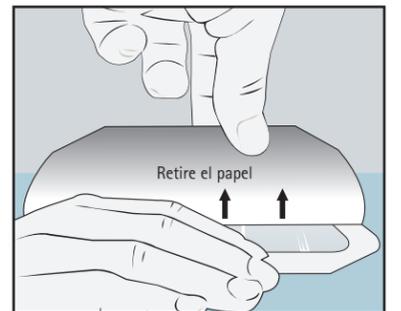

Retire la capa de papel del vendaje para abrirlo y exponer la superficie autoadhesiva.

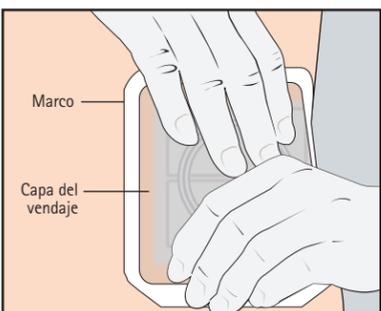


Mire el área donde se va a colocar el vendaje a través de la capa del empaque y colóquela en el centro sobre la herida. Presione hacia abajo.

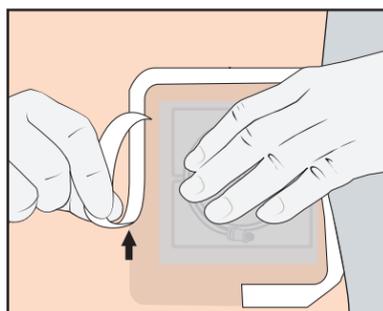

Retire lentamente el marco de papel restante por despegar de la sección de separación, mientras que alisa los bordes. Empuje firmemente hacia abajo desde el centro hacia los bordes.



Quítese los guantes y deséchelos.

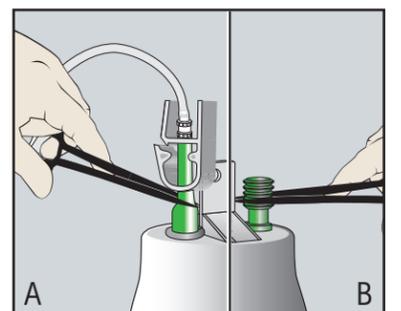

Levante la abrazadera de liberación de vacío y corte el tubo verde debajo de la pinza (A). Corte el indicador de vacío (B). Vacíe la botella en el inodoro o fregadero. Deseche el frasco.

Antes de utilizar este producto, asegúrese de que usted ha sido entrenado por un médico o una enfermera en la forma correcta de utilizar los elementos de este kit. Si usted tiene alguna pregunta o problema sobre el drenaje de fluido, comuníquese con su médico o enfermera.

### Rx only

ASEPT® es una marca registrada de pfm medical, inc. Spin-Lock® es una marca registrada de B. Braun Medical, Inc.

©2016 B. Braun Interventional Systems Inc. CV2045 7/16

Distribuido por:

**B. Braun Interventional Systems Inc.**

824 Twelfth Avenue | Bethlehem, PA 18018 USA

Tel 877 836 2228 | Fax 610 849 1334 | www.bisusa.org